

# Surecheck® Streamer



## ТЕСТ ЗА БРЕМЕННОСТ С НАД 99% ТОЧНОСТ.

Резултат още от първия ден на закъснението на цикъла!

## Листовка с информация за потребителя

Прочетете внимателно листовката преди употреба!

Забременяването може да е повод за радост или тревога. Ако предполагате, че сте бременна, първо трябва **ДА ПРОВЕРИТЕ** дали това наистина е така. Можете да си направите теста по всяко време. Surecheck® Streamer е разработен със специалната технология Colloidal Gold, гарантираща над 99% точност на резултата още от първия ден на закъснението на цикъла.

Точен резултат всеки път и по всяко време.

## ТОЧЕН ПО ВСЯКО ВРЕМЕ

Да се съхранява при температура между 4°C и 30°C.

Лесен за употреба, не се изискват специални умения или предишно обучение за направата на теста.

**Преди употреба:** **1.** Прочетете внимателно листовката. **2.** Подгответе часовник или друго време измервателно средство. **3.** Проверете срока на годност и не ползвайте теста, ако срокът е изтекъл. **4.** Не ползвайте теста, ако опаковката от фолио, в която е поставен, е повредена.

## КАК ДА СИ НАПРАВИМ ТЕСТА?



**1** Отворете опаковката от фолио и извадете теста.

**2** Уринирайте върху абсорбиращия накрайник в продължение на 3-5 секунди до пълното му намокряне.

**3** Проверете резултата след 5 минути.

## КАК ДА ТЪЛКУВАМЕ РЕЗУЛТАТИТЕ?



### НЕ СТЕ БРЕМЕННА

Има само една цветна чертичка в контролната зона (C).



### БРЕМЕННА СТЕ

Има две отчетливи цветни чертички: една в контролна зона (C) и втора в тестовата зона (T).

### Невалиден резултат

• Резултатът е невалиден, ако 5 минути след като сте си направили теста, в контролна зона (C) няма нито една чертичка. Повторете теста с нов комплект Surecheck® Streamer.

• Резултатът е невалиден при престой на теста извън защитната опаковка от 15 или повече минути преди тестването.



• Игнорирайте възможни видими промени в отчетения резултат 30 минути след провеждането на теста.

• Тестът за бременност Surecheck® Streamer не е за многократна употреба.

**Ако тестът е положителен, консултирайте се с лекар!**

**При трудности в разчитането на резултата, не предприемайте нищо преди да се посъветвате с лекар!**

## НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

### 1. Как работи тестът за бременност Surecheck®?

Surecheck® отчита наличието на хормона Human Chorionic Gonadotropin (hCG), който се отделя в урината малко след забременяването. Когато калки от урината, съдържащи този хормон, попаднат върху накрайника на теста, в прозрачното на резултата се появяват две чертички.

### 2. Кога да си направя тест за бременност?

Още на първия ден от закъснението на цикъла, по всяко време на денонощието – като се има предвид, че първата сутрешна урина обикновено е с по-висока концентрация на хормона hCG.

### 3. Имам нередовен цикъл. Кога да си направя теста?

При нередовен цикъл можете да си направите теста 19 дни след деня на евентуалното забременяване. Ако резултатът е отрицателен, направете тест отново след 48 часа.

### 4. Какво да правя, ако чертичката в тестовата зона (T) е много бледа?

Направете нов тест след 48 часа. Наситеността на цвета на чертичката зависи от концентрацията на хормона hCG.

### 5. Какво може да повлияе на резултата?

- Някои лекарства, като Humegon, Pregnil, Profasi, Pergonal и A.P.L., може да съдържат hCG хормон и приемът им може да повлияе върху резултата от теста.
- При тест в рамките на първите 8 седмици след раждане или аборт, резултатът може да е подвеждащо положителен заради остатъчната концентрация на хормона hCG в организма. При съмнения в резултата е препоръчително да се посъветвате с лекар.
- Приемът на голямо количество течности би могъл да намали концентрацията на хормона hCG в урината и по този начин да повлияе върху резултата.

Приемът на противовъзпалителни, антибиотични, болкоуспокояващи и алкохол не влияе върху резултата от теста.

БЕЗПЛАТЕН телефон за консултации в България:  
**0800 13456, 9:00 – 18:00, понеделник – петък.**

Всяка кутия Surecheck® Streamer съдържа: един стерилен тест за бременност Surecheck® Streamer в опаковка от защитно фолио; влагоабсорбираща торбичка (да не се отваря!); листовка с информация за потребителя; менструален календар. Бул Крос Био-Медицъл Ко. Лтд., Индустриална зона Бекиджия, КНР 102209. IECER® Шанхай Интернешънъл Холдинг Корп. ГмбХ (Европа), Хамбург, Германия. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Не за вътрешна употреба. Тест за самодиагностика с еднократна употреба. Медицинско изделие съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗМИ. Чувствителност на теста: 25 mIU/ml. Да се пази от пряка слънчева светлина, топлина и влага. Да се съхранява при температура между 4°C и 30°C. Вносител и дистрибутор: ЮниКомс България ЕООД, бул. България 118, бизнес център Абакус, et.5, София 1618, България, Т: +359 2 854 85 25, E: office@unicomcs.com