

Surecheck[®] Streamer



TEST ZA UTVRĐIVANJE TRUDNOĆE

Rezultat već prvog dana po izostanku menstruacije!

Uputstvo za upotrebu

Pre upotrebe medicinskog sredstva pročitati uputstvo za upotrebu!

Za svaku ženu, trudnoća može biti ili radosno ili panično iskustvo. U oba slučaja, prva stvar koju treba uraditi ukoliko sumnjate na trudnoću je da budete sigurni! Surecheck Streamer test za utvrđivanje trudnoće izrađen je na bazi Colloidal Gold tehnologije koja omogućuje veliku tačnost već prvog dana od izostanka menstruacije, u svako doba dana. Ovo čini da je Surecheck Streamer test za utvrđivanje trudnoće tačan kao i test urađen u laboratoriji. Zahvaljujući specijalno razvijenom i uglađenom dizajnu, Surecheck Streamer test za utvrđivanje trudnoće je higijenski i lak za upotrebu. Budite sigurni u tačnost rezultata svaki put.

TAČAN U SVAKOM TRENUTKU

Čuvati na temperaturi od 4°C do 30°C.

Pre započinjanja testa: **1.** Pažljivo pročitati uputstvo za upotrebu. **2.** Staviti sat ili štopericu na dohvata ruke. **3.** Proveriti rok upotrebe na pakovanju. Ne koristiti test posle isteka roka upotrebe. **4.** Test ne koristiti ukoliko je zaštitna folija pocepana ili oštećena.

POSTUPAK IZVOĐENJA TESTA



1 Neposredno pre primene, otvoriti zaštitnu foliju i izvaditi test.

2 3-5 sekundi urinirati na apsorbujući vrh testa kako bi ceo bio prekriven.

3 Rezultat očitati nakon 5 minuta.

OČITAVANJE REZULTATA



NEMA TRUDNOĆE

Vidljiva samo jedna obojena linija, u polju kontrole (C).

TRUDNOĆA

Vidljive dve udaljene obojene linije, jedna u polju kontrole (C), a druga u polju testa (T).

Nevažeci rezultat:

Rezultat testa je nevažeci ukoliko se nakon 5 minuta ne pojavi obojena linija u polju kontrole (C). Testiranje ponoviti koristeći novi, neotvoreni Surecheck Streamer test. Rezultat je takođe nevažeci ukoliko je test izvađen i van zaštitne folije duže od 15 minuta pre upotrebe.

Nakon očitavanja rezultata, ne donositi bilo kakvu medicinski važnu odluku pre konsultacije sa lekarom!

⚠ Ne uzimati u obzir izmene u rezultatima testa koje se pojave nakon 30 minuta. Surecheck Streamer test je za in vitro dijagnostičku upotrebu. Ne koristiti jedan Surecheck Streamer test više puta.

PITANJA I ODGOVORI

- Kako Surecheck Streamer test funkcioniše?**
Surecheck Streamer test za utvrđivanje trudnoće registruje prisustvo hCG (humani horionski gonadotropin) hormona u urinu. hCG se pojavljuje u urinu brzo nakon začeća. Kada urin koji sadrži hCG hormon dođe u dodir sa testom za utvrđivanje trudnoće, u prostoru za očitavanje rezultata pojavljuju se dve obojene linije.
- Kada najranije može da se uradi test?**
Surecheck Streamer test za utvrđivanje trudnoće može da se upotrebi već prvog dana od izostanka menstruacije, u bilo koje doba dana. Prva jutarnja mokraća obično ima najveću koncentraciju hCG hormona.
- Imam neredovnu menstruaciju. Kako da znam kada da uradim test?**
U slučaju neredovnih menstruacija, Surecheck Streamer test za utvrđivanje trudnoće može da se upotrebi 19 dana od dana mogućeg začeća. Ukoliko je rezultat testa negativan, testiranje se može ponoviti za 48 sati.

- Šta uraditi ukoliko je obojena linija u polju testa (T) bleđa?**
Ponoviti test nakon 48 sati koristeći novi Surecheck Streamer test. Intenzitet boje linije u polju testa može da varira u zavisnosti od koncentracije hCG hormona u urinu.
- Koji faktori mogu da utiču na rezultat testa?**
 - Pojedini lekovi (Humegon, Pregnyl, Profasi, Pergonal, A.P.L.) mogu da sadrže hCG hormon. Njihova upotreba može da utiče na rezultate testa.
 - Ukoliko se Surecheck Streamer test koristi u prvih 8 nedelja nakon porođaja ili abortusa, rezultat može biti lažno pozitivan zbog malih koncentracija hCG hormona koji je još prisutan u organizmu. Ukoliko ste zabrinuti, zamolite svog lekara da protumači rezultate testiranja.
 - Unošenje velike količine tečnosti može dovesti do smanjenja koncentracije hCG hormona u urinu i tako uticati na rezultat testa.
 - Pilule za kontracepciju, antibiotici, analgetici (lekovi protiv bolova) i alkohol nemaju uticaj na rezultate testa.

Pakovanje Surecheck Streamer testa sadrži: Jedan sterilni Surecheck Streamer test za utvrđivanje trudnoće u zaštitnoj foliji i desikant (kesica sa sredstvom za apsorpciju vlage – ne gutati); Uputstvo za upotrebu; Kalendar. Blue Cross Bio-Medical Co. Ltd., Beijing Industry Zone, Changping District, 102209 Beijing, PRC. Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Hamburg, Germany. Čuvati van domašaja i vidokruga dece. Nije za unutarnju upotrebu. Test je namenjen za samostalno testiranje. Upotreba testa ne zahteva posebnu obuku. Osetljivost testa: 25 mIU/ml. Čuvati dalje od direktnog sunčevog svetlosti, izvora toplote i vlage. Čuvati na temperaturi od 4°C do 30°C. Nosioc upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava: MEDITAS RS DOO, Beograd-Stari Grad, Gundulićev venac 38. Broj rešenja o upisu medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava: xxx-xx-xxxxxx.

Poslednja revizija: 19.01.2016